



INSTRUMENTS



**DENTASEPT®**

**Ultra**

#### INDICATIONS

Dentasept® Ultra est une solution désinfectante de haut niveau pour le traitement de l'instrumentation thermosensible.

#### AVANTAGES DU PRODUIT

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ pH neutre – compatible avec tous types de matériaux
- ✓ Activité bactéricide, fongicide et virucide : 10 min.
- ✓ Activité sporicide (désinfection de haut niveau) : 60 min.
- ✓ Solution utilisable pendant 30 jours
- ✓ Dispositif médical de classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée)

#### PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561.  
SARM : EN 13727.  
Mycobactéricide : EN 14348, EN 14563.  
Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562.  
Virucide: EN 14476 (10 min). Actif sur HIV-1, HBV, BVDV (virus modèle HCV) et Herpès virus.  
Sporicide : NF T 72-231, (C. Sporogenes), T 72-301 (C. difficile).

#### COMPOSITION QUALITATIVE

Solution de glutaraldéhyde (2%) tamponnée à pH 6, en présence d'un catalyseur d'effet de surface, colorant et excipients.

#### CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 litres.



INSTRUMENTS

# DENTASEPT® Ultra

## PROTOCOLE D'UTILISATION

Dentasept® Ultra est une solution désinfectante de haut niveau pour le traitement de l'instrumentation thermosensible.

### AVANT UTILISATION


S'assurer que les instruments ont été correctement nettoyés (Dentasept® 3H Rapide, Dentasept® Enzymatique etc) et rincés avant l'utilisation du Dentasept Ultra.

Rincer les instruments minutieusement à l'eau courante.

Porter des vêtements, des gants de protection appropriés, et protéger les yeux/le visage.

### COMMENT L'UTILISER

- 1 Verser Dentasept® Ultra dans un bac de trempage. Ne pas diluer.
- 2 Immerger les instruments totalement dans la solution.
- 3 Couvrir et laisser tremper pendant 10 minutes minimum. (1 heure pour obtenir une activité sporicide).
- 4 Retirer le panier du bac de trempage et rincer les instruments avec de l'eau stérile ou filtrée à 0.2 µm.
- 5 Sécher les instruments à l'aide d'un tissu sec.

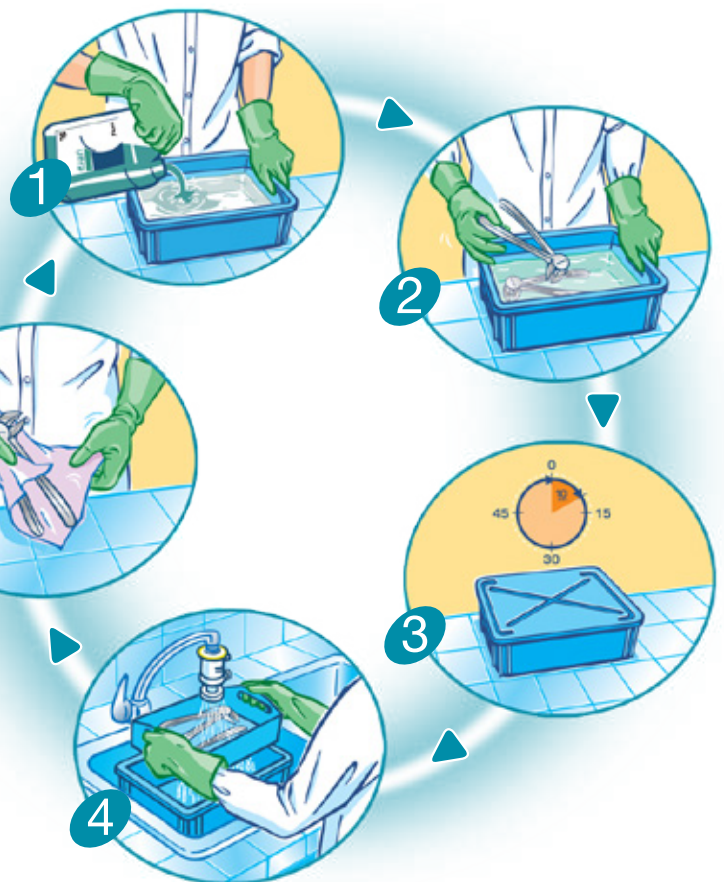

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas mélanger Dentasept® Ultra avec d'autres détergents ou produits chimiques.

Toujours lire la Fiche de Données de Sécurité pour les précautions d'utilisation relatives au produit. Selon la Directive Européenne 99/45/EEC et ses adaptations, Dentasept® Ultra est classé comme une préparation dangereuse.

Renouveler la solution au minimum tous les 30 jours. Conserver entre +5°C et +35°C.